

DentoTemp

Ciment de scellement provisoire de LONGUE DURÉE



Références

DentoTemp mélange manuel

2 seringues de 10 ml (base+catalyseur)
+ 10 spatules de mélange + 1 bloc de mélange DT-2.10

DentoTemp automix

2 seringues de 5 ml + 20 embouts mélangeurs DTCA2-20

DentoTemp automix kit intro

1 seringue de 5 ml + 5 embouts mélangeurs DTCA1-5

Embouts

20 embouts mélangeurs DTEM-20

AVANTAGES

- **Sans eugéno!**
aucune interférence avec les ciments de scellement définitifs
- **Capacité d'adhésion élevée, tout en permettant une dépose aisée**
- **Laisse une gencive parfaitement saine au moment du descellement**
- **Se lie à l'intrados des couronnes provisoires en résine**
Le retrait de l'élément provisoire entraîne la totalité de la couche de ciment sans laisser de débris à éliminer sur la dent naturelle
Les dents préparées restent parfaitement propres
- **Rebasage** et scellement des couronnes en un seul temps
- S'utilise sur dent vivante
- Faible épaisseur de film – résultat très esthétique
- **IDEAL IMPLANTS**

INDICATIONS

- scellement provisoire des éléments de prothèse fixée provisoires ou définitifs dans les cas de :
 - faible rétention
 - essai de longue durée
- scellement définitif des couronnes et bridges implanto-portés

TRUCS & ASTUCES

- Pour diminuer la rétention du DentoTemp, il est possible d'ajouter un peu de vaseline
- Pour enlever les éléments provisoires, la pince de Furrer est un outil très pratique
- Le DentoTemp se lie à l'intrados des dents provisoires en résine et est ensuite rebasable. Il est donc plus simple de ne pas retirer le DentoTemp de la dent provisoire et de resceller en ajoutant un peu de nouveau DentoTemp

« Une étoile est née » Clinic

« (Il) a tant d'avantages qu'il est bien difficile de n'y point succomber » Indépendentaire