

ProviTemp


Ciment de scellement provisoire



AVANTAGES

- **Sans eugénol**
Aucune interférence avec les ciments définitifs
- **Formule à base de résine**
Meilleure compatibilité avec les ciments définitifs résine
- **Résistant à la déformation au cours de la mastication**
- **Rétention classique**
- Permet un **retrait facile** de la restauration
- Scelle les restaurations de façon parfaitement **étanche**
- Teinte dentine pour une esthétique irréprochable
- Aucune réaction thermique
- Insoluble dans les fluides buccaux
- **Excès faciles à éliminer**, sans résidu
- Contient des **fluorures**

PROTOCOLE

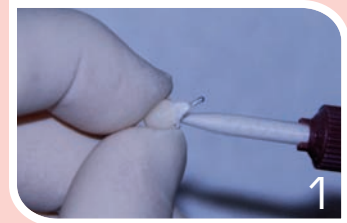

Injecter ProviTemp dans l'élément provisoire



Mettre en place et maintenir fermement. Temps de prise initiale : 1 min 30s à 2 min



Nettoyer les excès.
Prise finale : 2 min 30s à 3 min

INDICATIONS

- couronnes
- bridges
- attelles de contention
- essai de restaurations permanentes
- enregistrement de l'occlusion sur tout bourrelet d'occlusion

Références

ProviTemp Automix,
1 seringue de 5 ml + 10 embouts mélangeurs PTEMP1-10

Embouts mélangeurs
20 embouts mélangeurs pour la seringue Automix DTEM-20