

Traxodent

Pâte hémostatique pour rétraction gingivale



ETUIS HERMÉTIQUES
pour une conservation optimale



RECHARGE
D'EMBOUTS PLIABLES



RETRACAP
COIFFES DE COMPRESSION

SERINGUE ERGONOMIQUE de 0.7g
(en moyenne 5 applications)

AVANTAGES

- **Rétraction exceptionnelle**
L'expansion chimio-mécanique du Traxodent permet au contact de l'air l'écartement des tissus
- **Hémostase optimisée**
L'application du Traxodent stoppe le saignement par effet de compression
- **Ouverture atraumatique**
Pression douce sur le sulcus
- **Format seringue**
Ergonomie et facilité d'application
- **Embouts orientables et adaptables**
Angle d'injection facilement déterminé
- **Etui en aluminium refermable**
La pâte ne sèche pas et se conserve extrêmement bien
- **Pâte à consistance malléable**
Application, rinçage et élimination du produit simple et rapide

INDICATIONS


A utiliser avant :

- toute prise d'empreinte
- scellement
- préparation de cavités dentaires
- si une hémostase ou une rétraction est nécessaire

COMPOSITION

- 15% de Chlorure Hexahydrate d'Aluminium
- Formule brevetée à base d'argile
- Silice pyrogénique
- Sorbate de Potassium
- Nitrate de Potassium
- Pigment jaune FD&C N°5

PROTOCOLE

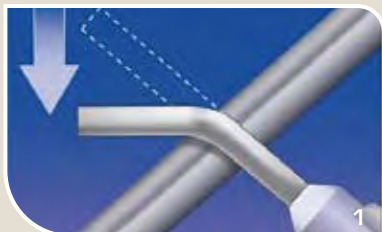

Plier l'embout Traxodent selon votre trajectoire d'injection



Appliquer le Traxodent à l'intérieur du sulcus tout en maintenant l'embout au dessus de celui-ci



S'assurer qu'il y ait assez de produit pour une rétraction gingivale adéquate. Laisser agir 2 minutes



Rincer et sécher la dent préparée

TRUCS & ASTUCES

■ Pour une pénétration optimale du Traxodent dans le sulcus, vous pouvez vous aider de coiffes de compression ou d'un instrument.



Aide de coiffes de compression pour pénétration optimale du Traxodent dans le sulcus. Après application du Traxodent dans le sulcus, placer la coiffe sur la dent et faire mordre le patient. Laisser agir 2 min. et rincer



Aide d'un instrument pour pénétration du Traxodent dans le sulcus

Références

Packs TRAXODENT

2 seringues de 0,7g + 6 embouts aiguilles + coiffes de compression	TRASTRT-2
7 seringues de 0,7g + 15 embouts aiguilles + coiffes de compression	TRABOI-7
25 seringues de 0,7g + 50 embouts aiguilles + coiffes de compression	TRAPACK-25

Recharge d'embouts

20 embouts aiguilles	TRAEMB-20
60 embouts aiguilles	TRAEMB-60

Recharges de coiffes de compression RETRACAP

25 coiffes de compression taille S	RECAP25-S
25 coiffes de compression taille M	RECAP25-M
25 coiffes de compression taille L	RECAP25-L