


PROTOCOLE



Optionnel, mordancer l'émail et/ou la dentine pendant 5 à 10s.
Lorsque le collage s'effectue sur de l'émail uniquement, mordancer l'émail pendant 20 à 30s.
Rincer abondamment et sécher




Appliquer 3 couches successives d'Iperbond

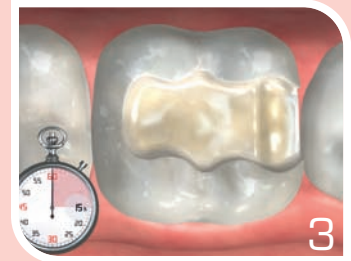

Laisser agir 15s



Sécher vigoureusement pendant au moins 5s

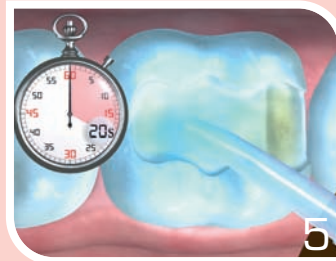

Photopolymériser pendant 20s



Pour le collage de composites auto polymérisables, dual ou pour les zones inaccessibles à la lumière, mélanger une quantité égale d'Iperbond et d'Iperbond Activator dans un godet et procéder aux étapes 2, 3 et 4