

TRUCS & ASTUCES

- On élimine la couche visqueuse (couche d'inhibition) qui se forme à la surface de la dent provisoire avec de l'alcool
- Bon à savoir : il n'y a pas de liaison entre les résines composites du type DentoCrown et les couronnes provisoires polycarboxylates. Pour qu'il y ait adhésion, il faut appliquer un adhésif entre la résine et la couronne provisoire
- Le DentoCrown, comme tous les matériaux de la même catégorie, n'est pas rebasable. Vous pouvez utiliser le DentoTemp pour combler les manques et sceller votre couronne provisoire