

TRUCS & ASTUCES

- Avant application du TotalCem, la dentine doit être sèche mais sans être desséchée
- Pour les inlays et les onlays, il est conseillé de mordancer les bords amélaire à l'acide phosphorique pour augmenter l'adhésion (en veillant à ne pas déborder sur la dentine)
- Pour majorer la rétention, il est possible d'appliquer un adhésif amélo-dentinaire avant le collage avec le TotalCem
- Comment nettoyer le canal avant d'appliquer le Totalcem pour avoir une adhésion optimale ?
 - 1- Éliminer tous les résidus de gutta avec le foret calibré
 - 2- Passer un insert ultra-sonore
 - 3- Rincer abondamment et sécher sans dessécher
 - 4- Appliquer le TotalCem avec l'embout extra-fin
- TotalCem n'est pas adapté aux collages à l'émail sans rétention mécanique (brackets orthodontiques, facettes)
- Lors du scellement d'un inlay en céramique, vous pouvez appliquer le protocole suivant pour augmenter les valeurs d'adhésion : acide fluorhydrique pendant 1 à 3 min, rinçage abondant, séchage et silane